

# HEINE BETA X

## Otoscope

### LES PRINCIPALES FONCTIONS EN UN COUP D'ŒIL

Pour garantir une performance et une longévité optimales de la batterie, chargez complètement votre Otoscope HEINE BETA X à 100 % avant sa première utilisation.

#### HEINE X CHANGE System

Améliorez les fonctions de votre otoscope grâce aux modules X CHANGE facilement interchangeable.

Il suffit de tourner pour déverrouiller et changer le module, par exemple pour prendre des photos avec votre smartphone ou changer de grossissement.

#### Trouver toutes les infos HEINE X CHANGE Modules de systèmes sur [heine.com](http://heine.com)

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour sur [heine.com/xchange](http://heine.com/xchange)

#### Indicateur de charge

||| 66 - 100 %

||| 33 - 66 %

||| 10 - 33 %

||| flashes  
< 10 %



#### Port d'insufflation

pour l'examen de la mobilité du tympan avec poire d'insufflation



#### Lampe d'examen supplémentaire HEINE inSPECT avec 2 niveaux d'intensité (interrupteur)

- **Luminosité faible** pour l'examen de la pupille
- **Luminosité forte** pour l'examen de la gorge et d'autres parties du corps



#### Lumière d'otoscopie avec 2 niveaux d'intensité (interrupteur)



#### On | off Fonction d'arrêt automatique après 5 minutes

QUALITY  
MADE IN GERMANY



# HEINE BETA X

## Otoscope

### HEINE F.O.

#### lampe d'otoscopie

Lumière à fibre optique  
pour l'examen de l'oreille

### Compatible avec les EcoTips

Embouts jetables HEINE  
AllSpec en plastique recyclé

### HEINE inSPECT

#### lumière d'examen additionnelle

Utilisez la lumière  
additionnelle HEINE  
inSPECT pour examiner  
en toute sécurité les  
yeux, la gorge ou  
d'autres parties du  
corps.

### Connexion de charge

Chargez avec USB-C ou  
station de charge CS1



Plus d'informations  
sur [heine.com](http://heine.com)

