

HEINE BETA X Ophthalmoscope

LES PRINCIPALES FONCTIONS EN UN COUP D'ŒIL

Pour garantir une performance et une longévité optimales de la batterie, chargez complètement votre Ophthalmoscope HEINE BETA X à 100 % avant sa première utilisation.



QUALITY
MADE IN GERMANY



HEINE BETA X

Ophthalmoscope

HEINE

focusCONTROL

Passer de l'examen du segment postérieur (F = fond d'œil) à celui du segment antérieur (C = cornée) de l'œil.

Choix du filtre

-  Filtre sans rouge
-  Sans filtre
-  Filtre polarisé



Roue des ouvertures

7 ouvertures différentes qui peuvent également être utilisées avec un filtre sans rouge ou avec un filtre polarisant



Pour des résultats rapides et faciles lors des examens du fond d'œil, choisissez les réglages marqués d'un point blanc :

-  Filtre: Filtre polarisé
-  Ouverture: Grand spot
- F** focusCONTROL: Fond d'oeil



Plus d'informations
sur heine.com

